

1. 제조원

피엠더블유 주식회사

- 본사 : 부산광역시 해운대구 센텀중앙로48, 904호 (우동, 에이스하이테크21)

- 제조소 : 울산광역시 울주군 청량읍 처용산업 3길 135, 경공업 1동 2층 A호

2. 신고번호 : 제신 20-847호

3. 제품명 : PMW Flocked Swab

4. 모델명 : PMW-SWAB DUAL

5. 제품구성

모델명	구성
PMW-SWAB DUAL	NP1 1 EA + OP2 1 EA 로 총 2 EA 1 SET

6. 사용 목적

질병 검사 등을 위하여 짧은 시간 안에 구강, 비강, 이강 또는 항문에서 체액, 분비물 등을 채취하는 도구.

7. 사용방법

① 사용 전 준비사항

- 사용 전 제품 포장의 이상 여부와 제품의 손상, 파손을 확인한다.

② 사용방법

- 1) 제품을 개봉한다.
- 2) 제품을 포장지로부터 조심스럽게 꺼낸다.
- 3) 환자로부터 검체를 채취한다.
- 4) 별도의 보관 또는 운반 용기에 제품의 헤드부를 넣고, Break Point 부분에 힘을 가한다.
(보관 또는 운반 용기가 클 경우 제품의 전체를 넣는다.)

③ 사용 후 보관 및 관리방법

- 1) 본 제품은 일회용이므로 사용 후 반드시 폐기한다.
- 2) 재사용 금지

8. 사용 시 주의사항

① 경고

- 1) 본 제품은 일회용 제품으로 재사용을 금지한다.
- 2) 본 제품은 포장에 파손되었을 경우 사용하지 않는다.
- 3) 본 제품을 수직으로 구부려 사용하지 않는다.

② 사용 시 주의사항

- 1) 사용하기 전에 제품의 손상이 없는지 확인한다.
- 2) 검체 채취 시 많은 힘을 가하거나 강하게 누르는 등의 과도한 힘이 가해지지 않도록 주의하여 사용한다.
- 3) 직사광선을 피하고 실온 보관한다.
- 4) 검체 채취 시 수직으로 구부려 사용할 경우 브레이크 포인트가 부러질 수 있으므로 주의하여 사용한다.